

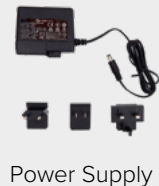


DELIVERY CONTENT:

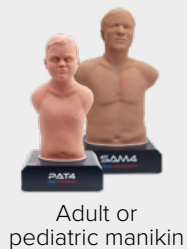


FEAUTURES:

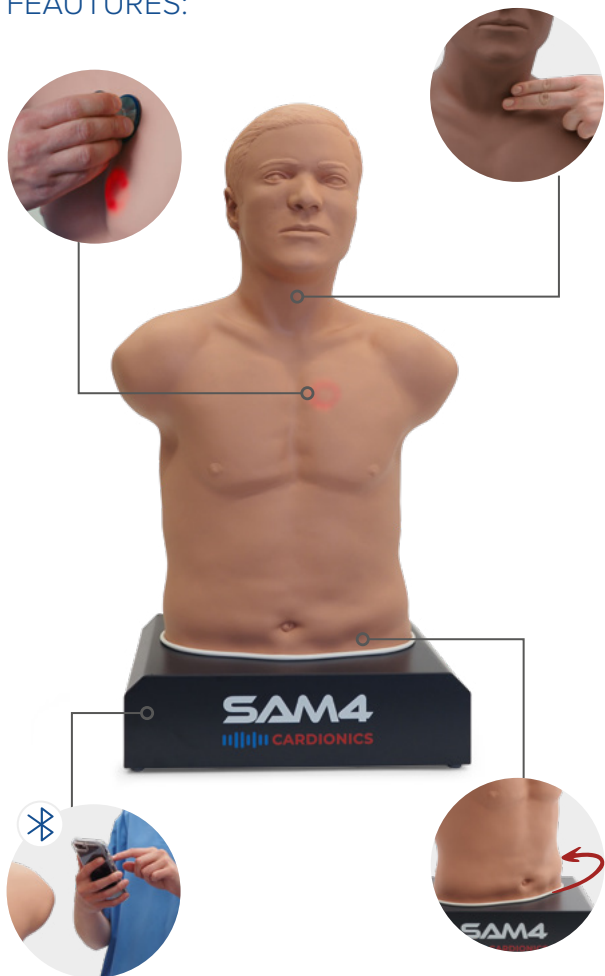

PAT4 has the same features, except carotid pulse.

8. PLACE YOUR STETHOSCOPE ON THE SELECTED LOCATION TO START LISTENING.

DE: Platzieren Sie Ihr Stethoskop an der zum Abhören ausgewählten Stelle. **FR:** Placez votre stéthoscope à l'endroit sélectionné pour commencer à écouter. **IT:** Posiziona il tuo stetoscopio sulla posizione selezionata per iniziare ad ascoltare. **ES:** Coloque su estetoscopio en la ubicación seleccionada para comenzar a escuchar. **PT:** Coloque seu estetoscópio no local selecionado para começar a ouvir. **HU:** Helyezze sztetoszkópját a kiválasztott helyre, hogy elkezdje a hallgatást. **RU:** Поместите стетоскоп на выбранное место, чтобы начать прослушивание. **TR:** Dinlemeye başlamak için stetoskopunuzu seçilen konuma yerleştirin. **ZH:** 将听诊器放在所选位置开始聆听。 **KO:** 선택한 위치에 청진기를 놓고 청진을 시작하세요.

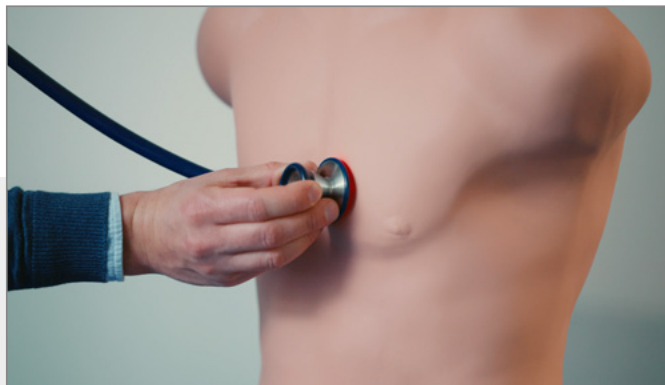

Scan the QR code to get more information about SAM4 Adult Auscultation Manikin & PAT4 Pediatric Auscultation Trainer

3bscientific.com

12/2024 0058834C

Cardionics
The Heart of Auscultation

3B
3B Scientific



Quick Start Guide

SAM4 ADULT AUSCULTATION MANIKIN

1024553 (718-8804) • 1025087 (718-8904)
1025098 (718-8814) • 1025099 (718-8914)

PAT4 PEDIATRIC AUSCULTATION TRAINER

1025486 (718-8852) • 1025487 (718-8952)

1. DOWNLOAD THE SAM4 ONLINE APP.

DE: Laden Sie die SAM4 Online-App herunter. **FR:** Téléchargez l'application SAM4 Online. **IT:** Scarica l'app SAM4 Online. **ES:** Descargue la aplicación SAM4 Online. **PT:** Baixe o aplicativo SAM4 Online. **HU:** Töltse le a SAM4 Online alkalmazást. **RU:** Скачайте приложение SAM4 Online. **TR:** SAM4 Online uygulamasını indirin. **ZH:** 下载SAM4在线应用程序。 **KO:** SAM4 온라인 앱을 다운로드하세요.



2. PRESS THE POWER BUTTON ONCE AND WAIT UNTIL A GREEN LIGHT BLINKS.



DE: Drücken Sie einmal den Netzschalter und warten Sie, bis ein grünes Licht blinkt. **FR:** Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et attendez que le voyant vert clignote. **IT:** Premi una volta il pulsante di accensione e attendi che la luce verde lampeggi. **ES:** Presione una vez el botón de encendido y espere hasta que una luz verde parpadee. **PT:** Pressione o botão de energia uma vez e espere até que uma luz verde pisque. **HU:** Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, és várja meg, amíg zölden villog. **RU:** Нажмите кнопку питания один раз и дождитесь, пока не начнет мигать зеленый индикатор. **TR:** Güç düğmesine bir kez basın ve yeşil ışık yanıp sönene kadar bekleyin. **ZH:** 按下一次电源按钮,等待绿色灯光闪烁。 **KO:** 전원 버튼을 한 번 누르고 녹색 불빛이 깜빡일 때까지 기다리세요.

30 sec



3. OPEN THE APP AND SELECT 'SCAN A QR CODE'.

DE: Öffnen Sie die App und wählen Sie 'QR-Code scannen'. **FR:** Ouvrez l'application et sélectionnez 'Scanner un code QR'. **IT:** Apri l'app e seleziona 'Scansiona un codice QR'. **ES:** Abra la aplicación y seleccione 'Escanear un código QR'. **PT:** Abra o aplicativo e selecione 'Escanear um código QR'. **HU:** Nyissa meg az alkalmazást, és válassza a 'QR-kód beolvasása' lehetőséget. **RU:** Откройте приложение и выберите 'Сканировать QR-код'. **TR:** Uygulamayı açın ve 'QR kodunu tara'yı seçin. **ZH:** 打开应用程序并选择'扫描二维码'。 **KO:** 앱을 열고 'QR 코드 스캔'을 선택하세요.

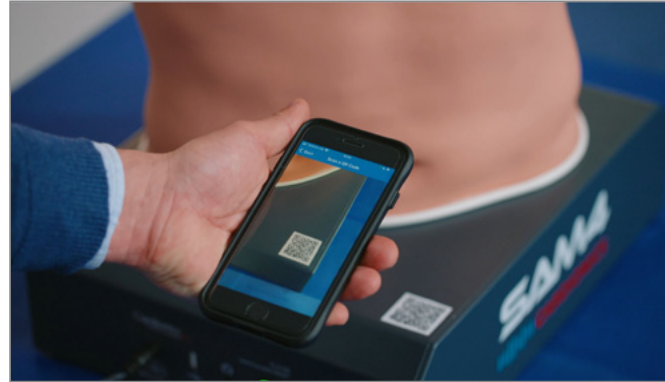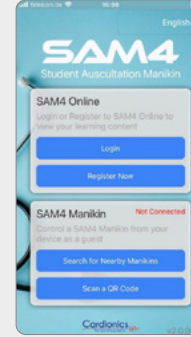


4. SCAN THE QR TAG


DE: Scannen Sie das QR-Tag. **FR:** Scannez l'étiquette QR. **IT:** Scansiona il tag QR. **ES:** Escanee la etiqueta QR. **PT:** Escaneie a etiqueta QR. **HU:** Olvassa be a QR-címkét. **RU:** Отсканируйте QR-метку. **TR:** QR etiketini tarayın. **ZH:** 扫描二维码标签。 **KO:** QR 태그를 스캔하세요.

5. SELECT LAUNCH CONTROL.

DE: Wählen Sie 'Kontrolle starten'. **FR:** Sélectionnez 'Démarrer le contrôle'. **IT:** Seleziona 'Avvia controllo'. **ES:** Seleccione 'Iniciar control'. **PT:** Selecione 'Iniciar controle'. **HU:** Válassza az 'Ellenőrzés indítása' lehetőséget. **RU:** Выберите 'Начать контроль'. **TR:** 'Kontrolü Başlat'ı seçin. **ZH:** 选择“启动控制”。 **KO:** '제어 시작'을 선택하세요.

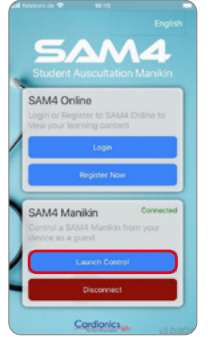

6. TAP THE ICON ON THE RIGHT TO OPEN THE LIBRARY.

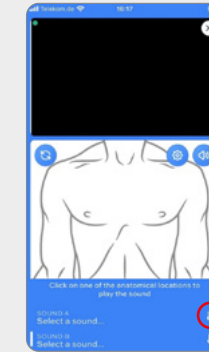

DE: Tippen Sie auf das Symbol rechts, um die Bibliothek zu öffnen. **FR:** Appuyez sur l'icône à droite pour ouvrir la bibliothèque. **IT:** Tocca l'icona a destra per aprire la libreria. **ES:** Toque el icono a la derecha para abrir la biblioteca. **PT:** Toque no ícone à direita para abrir a biblioteca. **HU:** Koppintson a jobb oldali ikonra a könyvtár megnyitásához. **RU:** Нажмите на значок справа, чтобы открыть библиотеку. **TR:** Kütüphaneyi açmak için sağdaki simgeye dokununuz. **ZH:** 点击右侧图标以打开库。 **KO:** 오른쪽 아이콘을 눌러 라이브러리를 여세요.

7. CHOOSE A SOUND AND SELECT AN AUSCULTATION SITE.

DE: Wählen Sie ein Geräusch und einen Abhörpunkt. **FR:** Choisissez un son et sélectionnez un site d'auscultation. **IT:** Scegli un suono e seleziona un sito di auscultazione. **ES:** Elija un sonido y seleccione un sitio de auscultación. **PT:** Escolha um som e selecione um local de ausculta. **HU:** Válasszon egy hangot, és válasszon egy auszkultációs helyet. **RU:** Выберите звук и выберите место аускультации. **TR:** Bir ses seçin ve bir auskültasyon bölgesi seçin. **ZH:** 选择一个声音并选择一个听诊部位。 **KO:** 소리를 선택하고 청진 부위를 선택하세요.

